

HEFILCON HUMECTANTE

Solução de conservação e desinfecção para lentes de contacto rígidas e permeáveis ao gás

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Este folheto informativo contém informação importante para uma correcta utilização deste produto com segurança. Por favor leia atentamente este folheto informativo e mantenha-o na sua posse para o caso de necessitar de o consultar mais tarde. É muito importante que o utilizador cumpra as indicações do seu especialista assim como as instruções contidas neste folheto informativo para uma correcta utilização deste produto.

1. DESCRIÇÃO- HEFILCON HUMECTANTE é uma solução para conservar e desinfetar lentes de contacto rígidas e permeáveis ao gás. Utilize esta solução diariamente tal como indicado nas instruções para a utilização.

2. MODO DE UTILIZAÇÃO -1- Lave muito bem as mãos. 2- Após a limpeza das suas lentes com um detergente para lentes de contacto (Ex: DUOLENS), encha o seu estojo porta-lentes com HEFILCON HUMECTANTE e deixe as lentes no estojo porta-lentes durante toda a noite ou, pelo menos, durante 6 horas. 3- Retire as lentes do estojo porta-lentes e enxágue-as com HEFILCON HUMECTANTE antes de colocá-las. 4- Se necessitar de retirar as suas lentes durante o dia, humedece-as com umas gotas de HEFILCON HUMECTANTE.

3. PRECAUÇÕES- Utilize sempre uma quantidade nova de solução para a desinfecção das suas lentes de contacto e rejeite a quantidade utilizada anteriormente. Evite tocar com os dedos na extremidade do conta-gotas. Mantenha o frasco bem fechado. Verifique que a embalagem se encontra intacta antes da primeira utilização. Utilizar todo o produto em 90 dias após a abertura da embalagem. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Não utilizar este produto se for alérgico a algum dos seus componentes. Em caso de irritação ocular retire as lentes e não volte a utilizar este produto sem consultar um médico ou um especialista em lentes de contacto. As lentes podem ser conservadas e fechadas no estojo porta-lentes por num período máximo de 30 dias.

4. COMPOSIÇÃO – Cloreto de sódio, ácido bórico, tetraborato de sódio, hidroxipropilmetilcelulose, poloxamer, edetato dissódico 0,1% e poli-hexametileno biguanida 0,0004% em água purificada.

5. SIMBOLOGIA- A simbologia utilizada neste folheto informativo e no rótulo do produto teve como base a norma EN 980 de símbolos gráficos harmonizados nos rótulos de produtos de saúde.

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	CONSULTAR INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
	FABRICANTE
	PRECAUÇÕES. LER ATENTAMENTE.
	PROTEGER DA LUZ DO SOL
	MANTER Á TEMPERATURA ASSINALADA

6. DADOS DO FABRICANTE

Laboratorios Lenticon S.A.
Ronda de Valdecarrizo 41B
E 28760 Tres Cantos. Madrid. España

Versão 1
Data – 2017/02

Distribuído em Portugal por



info@orsolutions.pt